

NÁVOD K POUŽITÍ

Parafínový zábal PUR 33 x 45 cm

Je klasifikován jako kosmetický prostředek

Popis

Jemná parafínová fólie z čistého parafínu, v kvalitě lékopisu, zajistí v praxi zcela čistou, hygienicky nenáročnou formu aplikace parafínu bez termošoku. Využití parafínových zábalů je založeno na účincích tepelné terapie a kosmetického efektu hydratace pokožky.

Jednorázové parafínové zábaly se používají pro podpůrnou terapii teplem (tzv. plíživé teplo), která má oproti podněcující terapii teplem (s termošokem) při klasickém použití parafínu mnoho výhod. Hlavním pozitivem tepelné terapie s využitím jednorázových parafínových zábalů je nenásilné předávání tepla do lidského těla s minimálním poklesem teploty zábalu během procedury (přibližně 25 minut).



Doporučujeme

Účinky jednorázového parafínového zábalu:

- intenzivní rozproudění tepla v povrchových a hlubokých tkáních
- zlepšuje prokrvení těla
- zvyšuje hybnost
- zmírňuje bolesti kloubů a svalů

Nedoporučujeme

Jednorázové parafínové zábaly se nesmějí používat při:

- horečnatých onemocněních
- akutních zánětlivých stavech
- akutních posttraumatických stavech
- krvácení

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureko.cz



- na otevřené rány a při akutních onemocněních kůže
- kopřivce vyvolané horkem
- tuberkulóze, těžkém poškození srdce
- nedostatečném krevním oběhu
- zvýšeném krevním tlaku, vysoce zánětlivých revmatických stavech

Postup

- I. Předehřejte rašelínový nosič tepla RNT I. na teplotu 58 °C.
- II. Položte parafínový zábal přímo na tělo pacienta (zábal se dá velmi snadno modelovat).
- III. Na parafínový zábal položte 1-3x přeložený ručník, který zpomalí postup tepla z nosiče. Více vrstev ručníku mezi parafínovým zábalem a nosičem tepla RNT I. znamená pomalejší nástup tepla k tělu klienta. Tělo tak přijme teplo postupně „ bez termošoku“.
- IV. Na navrstvený ručník položte předehřátý nosič tepla.
- V. Během prvních 3-5 minut postupně stoupá teplota parafínového zábalu „ bez termošoku“.
- VI. Následujících 10 – 20 minut si parafínový zábal udrží konstantní teplotu.
- VII. Po dokončení celé procedury dopřejte pacientovi několik desítek minut odpočinku v klidném prostředí.

Účinky

- intenzivně rozprostírá teplo v povrchových a hlubokých tkáních
- zlepšuje prokrvení těla
- zvyšuje hybnost
- odstraňuje bolesti kloubů a svalů
- má dezinfekční účinky

Interakce

Při současném použití lokálních hyperemizujících látek a teplých zábalů je možné počítat se silným podrážděním pokožky.

Upozornění

Bod tání parafínu používaného k výrobě jednorázových parafínových zábalů je přibližně 53 °C. Jednorázové parafínové zábalů jsou pouze 1x použitelné a nesmějí se používat k celkovým zábalům.

Dodávané parafínové zábalů jsou vyráběny s důrazem na výběr kvalitních materiálů a surovin.

Skladování

parafino voskové zábaly skladujte při pokojové teplotě a v suchu. Chraňte před mrazem.

Trvanlivost

Datum spotřeby je uveden na příložce klopy kartonu.

Likvidace

Likvidace podle místních platných úředních předpisů.

Balení

Dodává se v jedné velikosti. 33x45 cm balený po 20 nebo 5 kusech.

Objednací číslo

Et200600 Parafinový zábal PUR 33 x 45 cm, 20 ks

Et200605 Parafinový zábal PUR 33 x 45 cm, 5 ks

Bezpečnost

Při práci se surovinou a s výrobkem se zakazuje jíst, pít a kouřit, a je nutné dodržovat základní hygienické předpisy.

Vedlejší účinky:

Po velkoplošné léčbě prohřátím, vzniká při vstávání riziko orthosatické dysregulace. V tomto případě by měl pacient před vstáním zůstat několik minut sedět. U citlivých pacientů nelze vyloučit nadměrné zarudnutí pokožky.

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureka.cz