

NÁVOD K POUŽITÍ

Jednorázové akupunkturní jehly ORCA Premium s plastovým držátkem, 100 ks

Klasifikace zdravotnického prostředku: Riziková třída IIa, sterilní

Základní informace

Typ: Jednorázové akupunkturní jehly

Balení: 100 ks v krabičce, 20 x 5 ks, platíčko s individuálně balenými pěti jehlami,
barevně odlišená plastová držátka, bez zaváděcí trubičky



Určený účel použití

Akupunkturní jehly se zavádí do různých lokalit a struktur lidského těla s cílem vyvolat reflexní odezvu nervového systému směřující k odstranění bolesti, uvolnění svalů a stimulaci periferních nervů.

Indikace

- akutní a chronické bolesti zad
- bolesti hlavy
- poúrazové a pooperační bolestivé stavy
- bolesti ramen, kyčlí a kolen
- pánevní bolesti, bolesti SI kloubů
- úponové bolesti (tenisový loket, golfový loket a jiné entezopatie)
- plantární fascitidy a patní ostruhy
- svalové poranění

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureko.cz



- otoky

Kontraindikace

Relativní/lokální

- strach z jehel
- nesouhlas pacienta nebo nemožnost pacienta souhlas poskytnout (porucha kognitivních funkcí)
- lokální lymfedém
- alergie na kovy a další materiály využívané při DN
- nádorová onemocnění
- poruchy citlivosti
- oblast hematomu
- infekční onemocnění přenosné krví
- epilepsie

Absolutní

- poškození kůže
- horečnatý stav
- akutní lokální nebo systémové infekce
- abnormální krvácivost, srážlivost krve nebo stav vyžadující antikoagulační léčbu
- vaskulární onemocnění
- první 3 měsíce těhotenství
- nespolupracující pacient
- pooperační stav (především v okolí po operaci kloubu)

Popis

Název ORCA je zkratkou pro Originální čínské akupunkturní jehly. Jedná se o jehly z tradiční východní školy. Díky použití nerezové chirurgické oceli špičkové kvality se silikonovým povlakem schváleným FDA je zavádění jehel bezbolestné.

Prémiové jednorázové akupunkturní jehly jsou výtečné pro akupunkturu obličeje.

Materiál

Jehly jsou vyrobeny z chirurgické oceli nejvyšší kvality.

Všechny produkty jsou vyráběny s počítačem řízenou přesností a konzistencí. Je tak zajištěno, že každá jehla je vyrobena v té nejvyšší možné kvalitě.

Brusné a lešticí procesy jsou řízeny automaticky bez lidských zásahů. Je tím zajištěna dokonalá stálost zpracování.

Všechny jehly mají mikroskopicky leštěné tělo ošetřené za použití nejmodernějších technologií a optimalizovanou špičku, která geometricky zajišťuje snadné a bezbolestné zavádění.

Snadno uchopitelná držátka jsou speciálně navržena pro evropské terapeutky. Délka držátka činí až 25 mm.

Tělo jehly je pokryto mikroskopickou vrstvou bioinertního silikonu.

Pro zajištění bezpečnosti se používají pouze ty nejdokonalější sterilizační postupy a obalové materiály. Na jehlách nezůstává žádný zbytkový etylenoxid.

Většina námi nabízených jehel je sterilizována etylenoxidem.

Bez zaváděcí trubičky.

Sterilizace

Jehly jsou sterilizovány etylenoxidem (ETO) v přísném souladu s pokyny pro označení CE, ISO 9002

Exspirace

Vyznačena na balení.

Skladování

Garantovaná sterilita po dobu 3 let od data výroby. Skladujte na suchém stinném místě mimo dosah dětí.

Likvidace

Použité jehly jsou považovány za toxický odpad. Z tohoto důvodu je musí likvidovat specializovaná firma. Nikdy je nevyhazujte do běžného komunálního odpadu.

Objednací číslo

MEOR061613Jednorázové akupunkturní jehly ORCA Premium s plastovým držátkem, 0,16 x 13 mm, 100 ks

MEOR062015Jednorázové akupunkturní jehly ORCA Premium s plastovým držátkem, 0,20 x 15 mm, 100 ks

MEOR062525Jednorázové akupunkturní jehly ORCA Premium s plastovým držátkem, 0,25 x 25 mm, 100 ks

MEOR062540Jednorázové akupunkturní jehly ORCA Premium s plastovým držátkem, 0,25 x 40 mm, 100 ks

MEOR063030Jednorázové akupunkturní jehly ORCA Premium s plastovým držátkem, 0,30 x 30 mm, 100 ks

Výrobce

Wujiang City Shenlong
Medical Health Product Co. Ltd.
Gangzi Cun, Shenta, Lili Town
Wujiang District
Suzhou
215213 Jiangsu
China

Datum vydání návodu: 8. 11. 2015

CE 0197

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručů 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureko.cz

