

NÁVOD K POUŽITÍ

Sterilní jehly pro akupunkturní jednorázové použití (DB100)

dále jen

Jednorázové akupunkturní jehly DONGBANG se zaváděcí trubičkou, 100 ks

Klasifikace zdravotnického prostředku: Riziková třída IIa, sterilní

Základní informace

Typ: Jednorázové akupunkturní jehly

Balení: 100 ks v krabičce (20 x 5 ks - každá jehla balena jednotlivě se zaváděcí trubičkou, platíčko s individuálně balenými pěti jehlami, barevně odlišená plastová držátka)



Určený účel použití

Akupunkturní jehly se zavádí do různých lokalit a struktur lidského těla s cílem vyvolat reflexní odezvu nervového systému směřující k odstranění bolesti, uvolnění svalů a stimulaci periferních nervů.

Indikace

- akutní a chronické bolesti zad
- bolesti hlavy
- poúrazové a pooperační bolestivé stavy
- bolesti ramen, kyčlí a kolen
- pánevní bolesti, bolesti SI kloubů
- úponové bolesti (tenisový loket, golfový loket a jiné entezopatie)
- plantární fascitidy a patní ostruhy
- svalové poranění
- otoky

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureko.cz



Kontraindikace

Relativní/lokální

- strach z jehel
- nesouhlas pacienta nebo nemožnost pacienta souhlas poskytnout (porucha kognitivních funkcí)
- lokální lymfedém
- alergie na kovy a další materiály využívané při DN
- nádorová onemocnění
- poruchy citlivosti
- oblast hematomu
- infekční onemocnění přenosné krví
- epilepsie

Absolutní

- poškození kůže
- horečnatý stav
- akutní lokální nebo systémové infekce
- abnormální krvácivost, srážlivost krve nebo stav vyžadující antikoagulační léčbu
- vaskulární onemocnění
- první 3 měsíce těhotenství
- nespolupracující pacient
- pooperační stav (především v okolí po operaci kloubu)

Materiál

Jehly jsou vyrobeny z chirurgické oceli nejvyšší kvality.

Všechny produkty jsou vyráběny s počítačem řízenou přesností a konzistencí. Je tak zajištěno, že každá jehla je vyrobena v té nejvyšší možné kvalitě.

Brusné a leštící procesy jsou řízeny automaticky bez lidských zásahů. Je tím zajištěna dokonalá stálost zpracování.

Všechny jehly mají mikroskopicky leštěné tělo ošetřené za použití nejmodernějších technologií a optimalizovanou špičku, která geometricky zajišťuje snadné a bezbolestné zavádění.

Snadno uchopitelná držátka jsou speciálně navržena pro evropské therapy. Délka držátka činí až 25 mm.

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručů 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureko.cz



Tělo jehly je pokryto mikroskopickou vrstvou bioinertního silikonu.

Pro zajištění bezpečnosti se používají pouze ty nejdokonalejší sterilizační postupy a obalové materiály. Na jehlách nezůstává žádný zbytkový etylenoxid.

Většina námi nabízených jehel je sterilizována etylenoxidem.

Sterilizace

Jehly jsou sterilizovány etylenoxidem (ETO) v přísném souladu s pokyny pro označení CE, ISO 9002

Exspirace

Vyznačena na balení.

Skladování

Garantovaná sterilita po dobu 5 let od data výroby. Skladujte na suchém stinném místě mimo dosah dětí.

Likvidace

Použité jehly jsou považovány za toxický odpad. Z tohoto důvodu je musí likvidovat specializovaná firma. Nikdy je nevyhazujte do běžného komunálního odpadu.

Objednací číslo

MEDB051615 Jednorázové akupunkturní jehly DONGBANG, 0,16 x 15 mm, 100 ks

MEDB051630 Jednorázové akupunkturní jehly DONGBANG, 0,16 x 30 mm, 100 ks

MEDB051815 Jednorázové akupunkturní jehly DONGBANG, 0,18 x 15 mm, 100 ks

MEDB051830 Jednorázové akupunkturní jehly DONGBANG, 0,18 x 30 mm, 100 ks

MEDB051840 Jednorázové akupunkturní jehly DONGBANG, 0,18 x 40 mm, 100 ks

MEDB052015 Jednorázové akupunkturní jehly DONGBANG, 0,20 x 15 mm, 100 ks

MEDB052025 Jednorázové akupunkturní jehly DONGBANG, 0,20 x 25 mm, 100 ks

MEDB052030 Jednorázové akupunkturní jehly DONGBANG, 0,20 x 30 mm, 100 ks

MEDB052050 Jednorázové akupunkturní jehly DONGBANG, 0,20 x 50 mm, 100 ks

MEDB052215 Jednorázové akupunkturní jehly DONGBANG, 0,22 x 15 mm, 100 ks

MEDB052230 Jednorázové akupunkturní jehly DONGBANG, 0,22 x 30 mm, 100 ks

MEDB052240 Jednorázové akupunkturní jehly DONGBANG, 0,22 x 40 mm, 100 ks

MEDB052515 Jednorázové akupunkturní jehly DONGBANG, 0,25 x 15 mm, 100 ks

MEDB052525 Jednorázové akupunkturní jehly DONGBANG, 0,25 x 25 mm, 100 ks

MEDB052530 Jednorázové akupunkturní jehly DONGBANG, 0,25 x 30 mm, 100 ks

MEDB052540 Jednorázové akupunkturní jehly DONGBANG, 0,25 x 40 mm, 100 ks

MEDB052550 Jednorázové akupunkturní jehly DONGBANG, 0,25 x 50 mm, 100 ks

MEDB053030 Jednorázové akupunkturní jehly DONGBANG, 0,30 x 30 mm, 100 ks

MEDB053040 Jednorázové akupunkturní jehly DONGBANG, 0,30 x 40 mm, 100 ks

MEDB053050 Jednorázové akupunkturní jehly DONGBANG, 0,30 x 50 mm, 100 ks

Výrobce

DongBang Medical Co. Ltd.

40, 30 Saneopdanji-gil

Uncheun-eup, Boryeong-si

33506, Republic of Korea

Evropský zástupce

Meridius Medical Europe Ltd.

Unit 3D, North Point House, North Point Business

Park, New Mallow Road, Cork, T23 AT2P, Ireland

Datum vydání návodu: 8. 11. 2015

CE 0120

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.

Petra Bezručě 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75

Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00

letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30

telefon: +420 800 888 909

e-mail: info@eureko.cz

