

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Parafín Premium na zábaly, 50–52 °C, 3 kg, hypoalergenní

Je klasifikován jako kosmetický prostředek

#### Charakteristika produktu

Parafínové perličky umožňují snadné rozpuštění parafínu, který je vhodný pro všechna terapeutická využití. Parafínové perličky vysoké kvality s bodem tání 50–52 °C. Čistě bílý parafín se používá s příměsí parafínového oleje. Parafín se rozpouští v parafínových lázních, např. PL 12, PL 55, nebo v kombinovaném přístroji COMBI 200. Ohřátý parafín působí do nejhlubších vrstev pokožky a lidské tělo tak prohřívá a uvolňuje. Kromě pozitivních účinků na zdraví je přínosný i v oblasti kosmetiky, neboť jeho účinky výrazně působí proti tvorbě vrásek.



#### Postup

1. Rozdrolte parafínový granulát ještě před otevřením sáčku.
2. Sejměte víko z parafínové lázně.
3. Přidržte sáček nad vaničkou parafínové lázně a na vyznačeném místě sáček otevřete.
4. Vysypte obsah sáčku do vaničky a vaničku opět přiklopte.

#### Účinky

- uvolňuje svaly a klouby
- zlepšuje krevní oběh a prokrvení
- blahodárně působí i na nervovou soustavu

## Použití

- nemoce pohybového aparátu
- kloubní problémy (revma, artritida)
- proti celulitidě
- kosmetika

## Složení

Parafin

## Zábaly

### Postup při parafínovém zábalu rukou

Nejprve se ruce vydezinfikují a poté se ponoří do lázně s teplým parafínem, který je rozpuštěn společně s parafínovým olejem. Vosk přilne na pokožku téměř okamžitě. Následně se ruce zabalí do plastických a speciálních froté rukaviček (nebo se zabalí do froté ručníku). Doba aplikace je 15 až 20 minut.

### Postup při parafínovém lokálním zábalu

Spočívá v přikládání zahřáté dečky s napuštěným parafínem na tělo pacienta. Na dečku se přiloží igelit a froté ručník. Parafin v dečce tuhne, uvolňuje velké skupenské teplo, a tím prohřívá organismus. Doba aplikace je 15 až 20 minut.

## Skladování

Skladujte v temných, chráněných prostorech, mimo potraviny, při teplotách 5 - 25 °C. Chraňte před mrazem.

## Likvidace

Likvidace podle místních platných úředních předpisů.

## Trvanlivost

Doporučujeme spotřebovat do 24 měsíců po otevření.

## Balení

1 kg, 3 kg, 5 kg, 20 kg

## Objednací číslo

ET200501

[www.eureko.cz](http://www.eureko.cz)

### Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.  
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

### Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00  
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30  
telefon: +420 800 888 909  
e-mail: [info@eureko.cz](mailto:info@eureko.cz)



## Bezpečnost

První pomoc: V případě zásahu očí, je vypláchněte proudem čisté vody. Při požití vypijte 1/4 litru vody a vyvolejte zvracení. V případě jakýchkoliv následných zdravotních problémů vyhledejte lékařské ošetření.

[www.eureko.cz](http://www.eureko.cz)

### Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.  
Petra Bezručů 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

### Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00  
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30  
telefon: +420 800 888 909  
e-mail: [info@eureko.cz](mailto:info@eureko.cz)

