

NÁVOD K POUŽITÍ

Tensoplast Sport

Základní informace

Tento obvaz se vyrábí z vysoce pružných bavlněných vláken, takže se obvaz dobře tvarově přizpůsobuje povrchu, na který je přiložen. Lepicí vrstva se na obvaz nanáší v pruzích, takže kůže může „dýchat“.



Popis

Vysoce adhezní vlastnosti. Výjimečná elasticita. Jedinečná pevnost a tvarová paměť.

Prodyšnost.

Produkt neobsahuje latex.

Kontraindikace

Nepoužívejte ke krytí otevřených ran.

Charakteristika

- vysoce adhezní vlastnosti – obvaz odolává různě intenzivnímu tlaku a směru tahu při sportování nebo dlouhodobém použití
- výjimečná elasticita – použití obvazu neomezuje pocit pohodlí: obvaz se přizpůsobuje nejrůznějším tvarům těla
- jedinečná schopnost natažení obvazu a jeho tvarová paměť umožňují regulovat kompresi
- obvaz je prodyšný – pomáhá tak zabránit maceraci kůže

Kdy používat

- funkční utažení ve sportovní traumatologii (prevence a ošetření zranění)
- pevná opora pro klouby, vazivo a svalstvo
- kompresní obvaz ve flebologii
- fixace dlah

Expirace

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureko.cz



Vyznačena na obalu.

Likvidace

Likvidace podle místních platných úředních předpisů.

Skladování

Skladujte v suchu (< 25°C).

Objednací číslo

AU4005553 Tensoplast Sport, 3 cm x 2,5 m

AU4005556 Tensoplast Sport, 6 cm x 2,5 m

AU4005558 Tensoplast Sport, 8 cm x 2,5 m

AU4005560 Tensoplast Sport, 10 cm x 2,5 m

AU4005565 Tensoplast Sport, 15 cm x 2,5 m

AU4005570 Tensoplast Sport, 20 cm x 2,5 m

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručů 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureko.cz

