


## NÁVOD K POUŽITÍ

### Silikonová baňka – set 4 ks

#### Použití

Metabolismus, stimulace vitálních bioenergetických (akupunkturních) bodů, krevní oběh, vakuová masáž, všeobecné zdraví, bolesti ramen, bolesti zad, svalové bolesti, bolesti krční páteře, sportovní zranění, chiropraxe, fyzioterapie, atd.

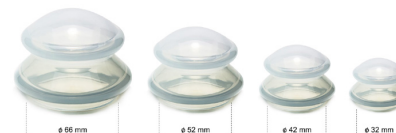

#### Charakteristika produktu

**Silikonová masážní baňka se snadnou kontrolou podtlaku.**

Dejte masážím větší říz a baňkujte bez plamene nebo namáhavého pumpování. Jak? S jedinečnými silikonovými masážními baňkami od Eureka. Naše masážní baňky jsou ideálním doplňkem klasických plastových nebo skleněných baněk. Baňky z medicínálního silikonu neobsahují ftaláty ani latex. Z jejich předností jistě oceníte:

- dobrou skladovatelnost
- dokonalou pružnost
- bezkonkurenční životnost

Využijte to nejlepší ze světa tradiční čínské medicíny a z éry moderních materiálů.

#### Výhody silikonových masážních baněk

– Snadná regulace podtlaku bez použití ohně či pumpy. Prostě jen stisknete horní část baňky. Intenzitou stisku určíte sílu podtlaku, aniž byste zdeformovali průměr baňky.

– Ideální pro baňkové masáže: snadné uchopení; jednoduchá kontrola podtlaku; snadné čištění. To jsou vlastnosti, které ze silikonových masážních baněk dělají ideální produkt na baňkové masáže. Namažte masírované místo speciálním masážním olejem a pusťte se do toho.

– Bezpečné použití kdekoli na těle. Baňky bezpečně využijete při masáži či baňkování:

- horních i dolních končetin včetně zápěstí a kotníků
- zad a břicha

[www.eureko.cz](http://www.eureko.cz)

#### Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.  
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

#### Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00  
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30  
telefon: +420 800 888 909  
e-mail: [info@eureko.cz](mailto:info@eureko.cz)



- hrudníku a krku
- obličeje

### Účinek masáží silikonovými baňkami

Aktivním pohybem silikonových masážních baněk po těle aktivujete hluboké tkáně a posílíte proudění krve. Zároveň odblokujete ucpané meridiánové dráhy a energetické uzly.

Dejte vaší pokožce a svalům nový impuls a rozhýbejte tok své životní energie. Nakopněte tělo k uzdravovacím a regeneračním procesům a užívejte života bez problémů.

## Masáž

### Jak se silikonovými baňkami zajistíte perfektně uvolňující masáž

- Očistěte kůži v místě masáže či baňkování. Pro lepší přilnavost baněk naneste na pokožku masážní olej.
- Promáčkněte „dno“ baňky směrem dolů a vytlačte z ní vzduch. Podtlak v baňce regulujte silou promáčknutí.
- Přiložte baňku na místo, které chcete masírovat či baňkovat, mírně zatlačte, abyste dosáhli dokonalého kontaktu baňky s pokožkou a pomalu tlak uvolněte. Díky podtlaku dojde k „nasátí“ pokožky směrem dovnitř baňky.
- Při masáži uchopte baňku za základnu a jemně s ní pohybujte.
- Pro usnadnění pohybu baňky pokožku zvlhčete. Použijte masážní olej či mýdlovou vodu.

## Důležité

### Na co si u silikonových masážních baněk dávat pozor:

- Pokud se chcete vyhnout podlitinám po baňkování, nenechávejte baňky příliš dlouho na jednom místě.
- Baňky aplikujte jemně a pokožku masírujte s použitím zvlhčovacích prostředků. Zabráníte tak vzniku odřenin nebo puchýřů.
- Udržujte baňky čisté. Využijte přístroj na čištění kojeneckých lahví nebo je vyařte v horké vodě. Pro běžné očištění použijte mýdlovou vodu.
- Nepoužívejte v těhotenství ani při nevolnostech.

## Všeobecné zdraví

Pravidelným baňkováním zlepšíte své celkové zdraví.

### Krevní oběh (masáže)

Baňkování snadno využijete k promasírování mnoha částí těla pro zlepšení krevního oběhu a léčení ostatních problémů. Před baňkováním nejdříve na

pokožku naneste zvlhčující krém nebo olej. To umožní snadné pohybování baňkami při masáži.

[www.eureko.cz](http://www.eureko.cz)

#### Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.  
Petra Bezručě 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

#### Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00  
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30  
telefon: +420 800 888 909  
e-mail: [info@eureko.cz](mailto:info@eureko.cz)



### Terapeutické využití

Uživatelé baňkovacích systémů potvrzují, že pocítili úlevu od bolestí spojených se symptomy jako jeischias, bolesti zad, ramen či krku, sportovní zranění, svalové bolesti, revmatismus, artróza a rovněž akutní a chronické problémy.

### Skladování

Výrobky uskladňujte na suchém a čistém místě při pokojové teplotě.

### Objednací číslo

ME100151

### Bezpečnostní opatření

- Baňku by neměly používat ani malé děti.
- Baňku nesmí používat osoby s vnitřním či vnějším krvácením.
- Nepřikládejte baňky na otevřené rány.
- Pokud při používání pocítíte únavu a malátnost, přestaňte sadu na chvíli používat.
- Nepoužívejte po operacích.
- Baňku by neměly používat osoby, které mají problémy se srdcem či osoby používající kardiostimulátor.
- V některých případech baňkovaná oblast změní barvu na tmavě hnědou. Jedná se o oblast akutní bolesti. Barva po několika dnech vymizí.
- Po každém použití baňky očistěte mýdlovou vodou.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

[www.eureko.cz](http://www.eureko.cz)

#### Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.  
Petra Bezručě 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

#### Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00  
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30  
telefon: +420 800 888 909  
e-mail: [info@eureko.cz](mailto:info@eureko.cz)

