

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Kompresní elastická páska FLOSSBAND, 2m x 2,5cm, švestka

Vážení zákazníci,

gratuluje vám k zakoupení vysoce kvalitního značkového výrobku Sanctband. Abyste mohli po dlouhou dobu využívat předností našich těchto konformních výrobků, prosíme vás o dodržování postupu při péči o výrobky.



### Informace o produktu

Výrobce: Sanctuary Health

Rozměr: 2m x 2,5cm

Odpor: silný

Barva: švestka

Materiál: přírodní latex

Trvanlivost: výrobce garantuje možnost skladování gumy od data výroby ve stejné kvalitě po dobu 3 let

### Jak funguje elastická guma Flossband

Pružná páska omotaná kolem postiženého místa stlačuje svaly. Tento tlak potlačuje funkci receptorů bolesti a působí i na fascie pod pokožkou. Aktivním a pasivním pohybem končetiny uvolníte jejich srůsty a oddělíte je od sebe.

Když po 2 minutách pásku odstraníte, uvolníte průtok krve a ostatních tekutin. Vzniklý příliv dokonale hydratuje ošetřovanou tkáň. Díky tomu dosáhnete jejího plného uzdravení.

[www.eureka.cz](http://www.eureka.cz)

**Kontaktní adresa a provozovna:**

EUREKO, s.r.o.  
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

**Provozní doba:**

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.  
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.  
Telefon: +420 800 888 909  
E-mail: [info@eureka.cz](mailto:info@eureka.cz)



## Kdy Flossband používat a co vám přinese

Technika flossingu je vhodná pro prevenci před sportem a po něm.

Je také velmi účinnou formou fyzioterapie. Terapeut ji použije v případě, že bolest omezuje rozsah pohybu atleta nebo pacienta.

Ideálně ho využijete i při protahování.

## Praktické rady

!!! Aplikaci pásky by měl provádět profesionální terapeut se znalostmi fyziologie a anatomie. Jednodušší aplikace při sportovním využití vyžadují patřičné zaškolení.

- nenechávejte Flossband na místě déle než 2 minuty
- páska Flossband není hračka. Udržujte ji mimo dosah dětí!
- Flossband používejte, pouze pokud jste řádně seznámeni s jeho pozitivními účinky a riziky, nebo pod dozorem terapeuta nebo jiného experta. Nesprávné použití může vést ke zranění.
- elastická páska Flossband je z čistě přírodní gumy. Nepoužívejte ji při alergii na latex!
- před použitím Flossband vždy zkontrolujte, nejsou-li na ní trhlinky nebo jiná poškození a používejte ji pouze v bezvadném stavu.
- tyto bezpečnostní pokyny neslouží jako návod na flossing a nenahrazují proto řádné školení.

## Kontraindikace

Nepoužívejte Flossband v případě těchto zdravotních potíží nebo rizikových faktorů:

- kožní choroby, křečové žíly, zánět žil, trombóza
- tumory, diabetes, zlomeniny, otevřené rány, patologické neoplazmy
- srdeční nedostatečnosti stupně C a D, chronické záněty, alergie na latex, lymfedémy
- při užívání léků na ředění krve nebo vysokých dávek kortikosteroidů
- zranění kloubů nebo svalů vyžadující lékařské vyšetření

## Uskladnění

Výrobky uskladňujte na suchém a čistém místě při pokojové teplotě.

## Péče o FLOSSBAND

[www.eureko.cz](http://www.eureko.cz)

### Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.  
Petra Bezručě 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

### Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.  
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.  
Telefon: +420 800 888 909  
E-mail: [info@eureko.cz](mailto:info@eureko.cz)



Pokud se FLOSSBAND znečistí častým používáním, můžete ho lehce omýt ve vlažné vodě, a poté osušit rozloženou na celou šířku. Skvrny a podobné znečistění se nesmí nikdy odstraňovat ředidlem nebo jinými rozpouštědly. Sterilizace párou nebo vroucí vodou není přípustná. Nesušte na ústředním topení nebo na přímém slunci. Horko a UV-záření pásce škodí.

## Objednací číslo

BS400004

[www.eureko.cz](http://www.eureko.cz)

**Kontaktní adresa a provozovna:**

EUREKO, s.r.o.  
Petra Bezručů 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

**Provozní doba:**

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.  
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.  
Telefon: +420 800 888 909  
E-mail: [info@eureko.cz](mailto:info@eureko.cz)

