

NÁVOD K POUŽITÍ

Kloubová ortéza na koleno MUELLER Hg80

Premium

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

děkujeme za zakoupení našeho produktu.

Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití. Při případných dotazech se obraťte na svého ošetřujícího lékaře nebo na specializovaný obchod, popř. na náš technický servis.

U zdravotnických prostředků doporučujeme vždy konzultaci s lékařem.



Základní informace

Výrobce: MUELLER Sports Medicine, Inc.

Záruka: 24 měsíců

Stupeň ochrany: nejvyšší

Barva: šedočerná

Velikosti

Podle obvodu středu kolena:

S	M	L	XL
30 - 35 cm	35 - 40 cm	40 - 45 cm	45 - 50 cm

www.eureka.cz

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureka.cz



Informace o produktu

Zraněné, nestabilní nebo slabé koleno vyžaduje maximální péči bez kompromisů. Dopřejte si ji s jedinečnou kloubovou ortézou na koleno – Hg80® Premium. Tento vylepšený model je profesionální odpovědí na tajné tužby každého, komu bolavé koleno otravuje život. Odhalte její tajemství a užijte si zase volný pohyb bez omezení.

Co všechno dokážete s kolenní ortézou Hg80® Premium

- maximálně a **spolehlivě** s ní **zpevníte** zraněné, oslabené nebo nestabilní koleno
- dopřejete si zcela **volný, přirozený pohyb**
- s patentovaným **triaxiálním trojkloubem** dáte svému kolenu bezkonkurenční ochranu
- **spolehlivě zafixujete ortézu a udržíte ji v požadované pozici.** Jak? Pomocí unikátního systému překryvných svrchních pásů. Těmi obtočíte celou horní část ortézy a následně je zapnete na suchý zip
- vnější pás z obousměrně pružné síťované textilie padne jako ulitý po stranách kolena a následně pohodlně spočine na stehenním svalu
- pevnějším sekundárním pláštěm se zabudovanou **gelovou oporou** pro vaši česku překryjete oblast holeně a zafixujete zadním zpevňujícím pásem na suchý zip

Jaké jsou další přednosti ortézy na koleno model Hg80® Premium

Co kromě jedinečných stabilizačních schopností a pohodlném nošení ještě oceníte na kolenní ortéze Hg80® Premium?

- **moderní antimikrobiální textilii** HydraCinn™ s flatlockovými švy, která se vyznačuje extrémní prodyšností a je měkká na omak
- design základního návleku se zúženým středem a **vnitřní protiskluzové úchyty** s vlnkovým provedením, díky nimž ortéza drží na místě
- speciální ochranu na zpevnění česky
- sáček na praní nebo přenášení
- praktická "kapsička", za kterou zaberete, když potřebujete ortézu natáhnout

Kdy použijete ortézu na koleno Hg80® Premium

- díky maximálnímu stupni ochrany je ortéza vhodná na zpevnění zraněného, slabého nebo nestabilního kolena
- ideální je i při preventivním použití pokud očekáváte zvýšenou zátěž
- po snadném vyjmutí postranní kloubové výztuže dostanete bandáž se středním stupněm ochrany

www.eureka.cz

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureka.cz



Pokyny k praní

- Myjte ručně ve studené vodě s jemným pracím prostředkem.
- Nepoužívejte bělicí prostředek ani změkčovačlo.
- Pečlivě opláchněte a nechte uschnout. Zbytky mýdla mohou způsobit podráždění kůže a vést k opotřebení materiálu.
- Nečistěte chemicky.
- Nežehlete.

Důležité pokyny:

- Zdravotnický prostředek je výrobek na lékařský předpis, který musí být nošen dle návodu k použití
- výrobek je určen pro jednorázové použití pacientem
- při neodborném použití je vyloučena záruka na výrobek
- na výrobku neprovádějte žádné vlastní úpravy. Při nerespektování může být funkce výrobku omezena
- pokud zjistíte na sobě neobvyklé změny (např. zhoršení potíží), ihned prosím vyhledejte svého lékaře
- kombinace s jinými výrobky (např. kompresní punčochy) musí být předem projednána s ošetřujícím lékařem
- zabraňte styku výrobku s prostředky obsahujícími tuk a kyseliny, mastí a tělovým mlékem
- likvidace výrobku smí být provedena bez problémů prostřednictvím domovního odpadu
- pokud jsou suché zipy na výrobku, je třeba je prát zapnuté a udržovat nezanesené, jinak ztratí svoji funkci

Objednací číslo

MS3016S Kloubová ortéza na koleno MUELLER Hg80 Premium, vel. S

MS3016M Kloubová ortéza na koleno MUELLER Hg80 Premium, vel. M

MS3016L Kloubová ortéza na koleno MUELLER Hg80 Premium, vel. L

MS3016XL Kloubová ortéza na koleno MUELLER Hg80 Premium, vel. XL

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureko.cz

