

NÁVOD K POUŽITÍ

Natahovací ortéza na koleno s kloubem Hinged

Knee Brace

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

děkujeme za zakoupení našeho produktu.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Při případných dotazech se obraťte na svého ošetřujícího lékaře nebo na specializovaný obchod, popř. na náš technický servis.

U zdravotnických prostředků doporučujeme vždy konzultaci s lékařem.



Základní informace

Výrobce: MUELLER Sports Medicine, Inc.

Záruka: 24 měsíců

Stupeň ochrany: nejvyšší

Barva: černá

Velikosti

Podle obvodu středu kolena:

S	M	L	XL	XXL
30 - 35 cm	35 - 40 cm	40 - 45 cm	45 - 50 cm	50 - 55 cm

www.eureka.cz

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureka.cz



Informace o produktu

Co dáte svému bolavému kolenu, když potřebuje maximální středovou a boční podporu a přitom se chcete pohybovat bez omezení? My volíme ortézu na koleno MUELLER Hinged Knee Brace 2333. Tato unikátní kloubová ortéza z měkkého neoprenu udržuje příjemné a hojivé teplo a zároveň ponechává pružnost kolenu i svalům. Díky předním a zadním výztužným pásům máte jistotu maximální opory i při náročných sportech. S kolenní ortézou MUELLER Hinged Knee Brace 2333 vás bolesti nikdy nesrazí do kolen.

Indikace

Tato ortéza vám pomůže při problémech se slabými nebo zraněnými koleny. Odborníci ji předepisují i jako součást léčby měknutí chrupavky (chondromalacie).

Doporučujeme ji k řešení problémů při

- dlouhodobých potížích s křížovými nebo postranními vazy
- bolestech
- vyšší nestabilitě kolene

Další přednosti kolenní ortézy MUELLER Hinged Knee Brace

Čím se kolenní ortéza odlišuje od jiných typů a značek?

- **třfosým provedením kloubu.** Díky němu svému kolenu dopřejete **přirozený pohyb bez omezení**
- podporou česky pomocí vloženého tlakového válečku a obšití - díky němu kontrolujete dráhu česky a lehce ji přizdvihnete
- tvarovaným provedením pro lepší přilnavost
- předními a zadními pásy s možností protisměrného nastavení – díky nim ortéza drží na místě a neklouže
- speciálními **nastavitelnými pásky**, díky kterým si sami určíte míru stažení. Rovněž s nimi bezpečně zafixujete ortézu na správném místě
- okraji lemovanými hladkými švy, které brání odření a podráždění

Nedělejte kompromisy, když jde o vaše zdraví. Dejte svému tělu to nejlepší - kolenní ortézy MUELLER Hinged Knee Brace.

Pokyny k praní

- Myjte ručně ve studené vodě s jemným pracím prostředkem.
- Nepoužívejte bělicí prostředek ani změkčovačlo.
- Pečlivě opláchněte a nechte uschnout. Zbytky mýdla mohou způsobit podráždění kůže a vést k opotřebení materiálu.

- Nečistěte chemicky.
- Nežehlete.

Důležité pokyny:

- Zdravotnický prostředek je výrobek na lékařský předpis, který musí být nošen dle návodu k použití
- výrobek je určen pro jednorázové použití pacientem
- při neodborném použití je vyloučena záruka na výrobek
- na výrobku neprovádějte žádné vlastní úpravy. Při nerespektování může být funkce výrobku omezena
- pokud zjistíte na sobě neobvyklé změny (např. zhoršení potíží), ihned prosím vyhledejte svého lékaře
- kombinace s jinými výrobky (např. kompresní punčochy) musí být předem projednána s ošetřujícím lékařem
- zabraňte styku výrobku s prostředky obsahujícími tuk a kyseliny, mastí a tělovým mlékem
- likvidace výrobku smí být provedena bez problémů prostřednictvím domovního odpadu
- pokud jsou suché zipy na výrobku, je třeba je prát zapnuté a udržovat nezanesené, jinak ztratí svoji funkci

Objednací číslo

MS3018S Ortéza na koleno MUELLER Hinged Knee Brace 2333, vel. S

MS3018M Ortéza na koleno MUELLER Hinged Knee Brace 2333, vel. M

MS3018L Ortéza na koleno MUELLER Hinged Knee Brace 2333, vel. L

MS3018XL Ortéza na koleno MUELLER Hinged Knee Brace 2333, vel. XL

MS3018XXL Ortéza na koleno MUELLER Hinged Knee Brace 2333, vel. XXL

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureko.cz

