

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Bandáž zápěstí MUELLER Life Care for Her

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení našeho produktu.

Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití. Při případných dotazech se obraťte na svého ošetřujícího lékaře nebo na specializovaný obchod, popř. na náš technický servis.

U zdravotnických prostředků doporučujeme vždy konzultaci s lékařem.



### Základní informace

Výrobce: MUELLER Sports Medicine, Inc.

Záruka: 24 měsíců

Stupeň ochrany: střední

Barva: bílo-fialová

### Velikosti

Podle obvodu dlaně:

S	M	L	XL
16,5 - 19 cm	19 - 21,5 cm	21,5 - 24 cm	24 - 26,5 cm

### Informace o produktu

Současný způsob života enormně zatěžuje vaše zápěstí. I proto stále roste počet návštěv lékařů a operací. Chraňte své zápěstí

- při celodenní práci
- během cvičení a sportů
- v „běžném“ životě

[www.eureko.cz](http://www.eureko.cz)

#### Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.  
Podhorská 967/17, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

#### Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.  
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.  
Telefon: +420 800 888 909  
E-mail: [info@eureko.cz](mailto:info@eureko.cz)



Jak? Bandážemi na zápěstí Life Care™ for Her. Navzdory názvu jsou vhodné pro všechny bez rozdílu věku či pohlaví. Spolehlivě uleví vašemu zápěstí a dodají mu potřebnou oporu. Proč jsou mezi uživateli oblíbené?

- celodenní pohodlné nošení
- díky ultratenké úpravě je **diskrétně skryjete** pod oblečení
- vhodné **pro každého** bez rozdílu
- jsou dokonale **prodyšné**

Na ultratenké ortézy/bandáže Life Care™ for her je vždy spoleh. Vsaďte na ně i vy, až půjde o vaše zápěstí.

## Co ještě uživatelé oceňují na bandážích na zápěstí Life Care™ for Her

- **zdvojenou vrstvu** materiálu v rizikových kompresních bodech a na hřbetě ruky
- inovativní tkaninu **bez latexu**
- speciální technologii - **mikrobický štít Aegis**, který zabrání množení mikroorganismů pod bandáží. Vaše bandáž tak vydrží déle a nebude zapáchat
- **dokonale vám přilnou** k ruce, neshrnují se ani neškrtí

## Pokyny k praní

- Myjte ručně ve studené vodě s jemným pracím prostředkem.
- Nepoužívejte bělicí prostředek ani změkčovačlo.
- Pečlivě opláchněte a nechte uschnout. Zbytky mýdla mohou způsobit podráždění kůže a vést k opotřebení materiálu.
- Nečistěte chemicky.
- Nežehlete.

## Důležité pokyny:

- Zdravotnický prostředek je výrobek na lékařský předpis, který musí být nošen dle návodu k použití
- výrobek je určen pro jednorázové použití pacientem
- při neodborném použití je vyloučena záruka na výrobek
- na výrobku neprovádějte žádné vlastní úpravy. Při nerespektování může být funkce výrobku omezena
- pokud zjistíte na sobě neobvyklé změny (např. zhoršení potíží), ihned prosím vyhledejte svého lékaře
- kombinace s jinými výrobky (např. kompresní punčochy) musí být předem projednána s ošetřujícím lékařem
- zabraňte styku výrobku s prostředky obsahujícími tuk a kyseliny, mastí a tělovým mlékem
- likvidace výrobku smí být provedena bez problémů prostřednictvím domovního odpadu
- pokud jsou suché zipy na výrobku, je třeba je prát zapnuté a udržovat nezanesené, jinak ztratí svoji funkci

## Objednací číslo

MS3024S Bandáž zápěstí MUELLER Life Care for Her, vel. S

MS3024M Bandáž zápěstí MUELLER Life Care for Her, vel. M

MS3024L Bandáž zápěstí MUELLER Life Care for Her, vel. L

MS3024XL Bandáž zápěstí MUELLER Life Care for Her, vel. XL

[www.eureko.cz](http://www.eureko.cz)

**Kontaktní adresa a provozovna:**

EUREKO, s.r.o.

Podhorská 967/17, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75

Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

**Provozní doba:**

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.

Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.

Telefon: +420 800 888 909

E-mail: [info@eureko.cz](mailto:info@eureko.cz)

