

NÁVOD K POUŽITÍ

Odstraňovač tejpů ve spreji přátelský k pokožce, 118 ml

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení našeho produktu.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Při případných dotazech se obraťte na svého ošetřujícího lékaře nebo na specializovaný obchod, popř. na náš technický servis.

U zdravotnických prostředků doporučujeme vždy konzultaci s lékařem.



Základní informace

Výrobce: Mueller

Objem/hmotnost: 118ml/113 g

Záruka: 24 měsíců

Exspirace: vyznačena na obalu

S aloe vera

Zapomeňte na bolestivé strhávání – s odstraňovačem lepidla a tejpů to jde samo

- **odmaštění** pokožky před kinesioteapíngem nebo aplikací pevných tejpů (stahovacích pásek)
- odstranění **zbytků lepidla** z kůže nebo nástrojů

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureko.cz



- **rychlé a bezbolestné** sundávání tejpů a náplastí

Jak tyto „oříšky“ louskáte vy? Každý má své osvědčené metody, na které nedá dopustit. Naším favoritem je MUELLER Tape & Tuffner® Remover. Proč?

- nedráždí pokožku
- snadno se aplikuje
- účinkuje už **za několik vteřin**

Ulehčete si život a vyhněte se bolesti, když je to tak snadné.

Jak odstraňovač tejpů správně použít?

Použití odstraňovače je snadné:

1. nastříkejte na tejp nebo pásku.
2. nechte pár sekund působit.
3. opatrně tejp nastříhnete a odstraňte ho z pokožky.

Důležité pokyny:

- při neodborném použití je vyloučena záruka na výrobek
- na výrobku neprovádějte žádné vlastní úpravy. Při nerespektování může být funkce výrobku omezena
- pokud zjistíte na sobě neobvyklé změny (např. zhoršení potíží), ihned prosím vyhledejte svého lékaře
- likvidace výrobku smí být provedena bez problémů prostřednictvím domovního odpadu

Varování: Vyhněte se použití odstraňovače lepidla a tejpů když...máte v místě aplikace otevřené rány.

V jiném případě se není třeba obávat. Odstraňovač lepidla MUELLER Tape & Tuffner® Remover je přátelský k pokožce a brání jejímu poškození při nešetrném snímání náplastí s adhezivní vrstvou.

Objednací číslo

MS3056 Odstraňovač tejpů ve spreji přátelský k pokožce, 118 ml