

NÁVOD K POUŽITÍ

Dongbang sada na baňkování, 10 ks

Základní informace:

Výrobce: DONGBANG AcuPrime

Materiál: polykarbonát, silikon (ventilek)



Cestovní sada pro dokonalé baňkování nebo masáže

Sada 10 baněk v praktickém kufříku. Baňky jsou z vysoce odolného plastu (polykarbonátu) mají nový, vylepšený ventilek. Ten je odpovědí na podněty našich zákazníků. Díky němu máte jistotu

- spolehlivého utěsnění
- snadné regulace tlaku

Po sundání ventilků můžete baňky bez obav sterilizovat. Vsaďte při baňkování na kvalitu a užijte si ho plnými doušky společně se svými klienty.

Co najdete v sadě baněk na baňkování

Tato sada obsahuje 10 baněk ze speciálního zesíleného polykarbonátu:

7 x 55 mm

1 x 48 mm

1 x 43 mm

1 x 34 mm

K tomu dostanete ruční pumpičku na vytvoření podtlaku.

Použití baňky na baňkování

Baňkování či masáž s plastovými baňkami není žádná věda. Stačí dodržet několik základních úkonů:

1. nejdříve připravte pokožku pacienta. Ideální je použít masážní olej nebo emulzi. Zajistíte si tak dobrou přilnavost a lepší kluznost baněk

2. na ventilek baňky nasadíte pumpu
3. přiložte baňku na pokožku a 2-3x zatlačte píst pumpy
4. podtlak v baňce lze regulovat ventilkem v horní části. Stačí ho zatlačit směrem do strany

Tipy pro baňkování

Ventilek je dosti citlivý. Když budete baňkou pohybovat, dejte pozor na to, abyste se ho nedotkli a nenapustili do baňky vzduch. Při masáži proto baňky držte za prostřední část.

Doporučuje se vyvařit baňky před každým použitím nebo je sterilizovat v autoklávu.

Jaké výhody mají plastové baňky

- velmi odolný a lehký materiál
- různé velikosti umožňují univerzální použití
- vylepšená životnost ventilků i baněk
- snadná sterilizace a dezinfekce
- silnější a pevnější materiál zajišťuje větší životnost a odolnost

Pro koho je vhodná sada baněk

Sadu baněk využijí především proškolení experti, jako jsou terapeuti či maséři. Podmínkou pro úspěšné a bezpečné baňkování je potřeba mít zvládnuté alespoň základy. Podrobnosti najdete například v odborné publikaci Baňkování a moxování pro maséry.

Baňky nepoužívejte když...

Baňkování je super součástí tradiční čínské medicíny, ale dokáže být i špatný pán. Kdy se mu vyhnout?

- v těhotenství – vyhněte se použití na podbřišku a na spodku zad
- když se během procedury dostaví únava či malátnost
- u dětských pacientů
- v případě jakéhokoliv krvácení – vnějšího i vnitřního
- když máte srdeční potíže nebo používáte kardiostimulátor

Správné čištění baněk

Baňky se doporučuje sterilizovat po každém použití. Máte několik možností:

- vyvařením
- v autoklávu

- denaturovaným líhem

Správným čištěním si zajistíte dlouhou životnost a spolehlivou funkci baněk.

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručů 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureko.cz

