

NÁVOD K POUŽITÍ

Masážní baňka BellaBambi Intense 35 mm

tmavě modrá

Základní informace

Barva: tmavě modrá

Materiál: biokompatibilní silikon

Průměr: 3,5 cm

Typ: silikonové baňky

Oblast použití: šíje, záda, břicho, hýždě a stehna

Masážní baňky BellaBambi – vaše oáza pohody a klidu

Moderní doba je orientovaná na výkony a příliš uspěchaná. S tím spojený stres způsobuje svalové tenze, bolesti zad a únavu. Díky masážním baňkám BellaBambi máte šanci něco s tím udělat. Dopřejte si dokonale uvolňující masáž, wellness péči nebo peeling.

Nádavkem získáte

- vyladěné toky tělesných energií a tekutin
- dokonale napnutou pokožku břicha, hýždí a stehen
- vypnutí a úlevu od každodenního stresu
- rychlejší a účinnější detoxikaci

Naučte se udělat si čas od času radost. Vyplatí se to.

Čím vás masážní baňky BellaBambi zaručeně „dostanou“?

Masážní baňky BellaBambi patří mezi absolutní světovou špičku. Klidně můžeme říci, že jsou aktuálně nejlepší na světě, a to z několika důvodů:

- jejich ovládání je dokonale snadné a nejbližší konkurence je na míle daleko
- díky ergonomickému designu zvládnete aplikaci jednoruč a nebudete přitom deformovat hrdlo baňky
- dáme vám pětiletou záruku na prasknutí baňky

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.
Podhorská 967/17, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureko.cz



- dermatologicky certifikovaný silikon je ideální pro styk se živými organizmy

Nevěříte? Schválně si to vyzkoušejte, ale varujeme vás: baňku BellaBambi už nedáte z ruky.

Co získáte masáží s baňkami BellaBambi Intense

Kromě příjemných pocitů přináší baňková masáž množství benefitů pro vaše tělo

- uvolníte s nimi energetické dráhy a meridiány ve vašem těle
- napomůžete tvorbě kolagenových vláken a jejich růstu
- odplavíte z lymfy toxiny a jiné nechtěné látky
- připravíte pokožku na aplikaci krémů a zvýšíte její účinek
- očistíte pleť jemným peelingovým účinkem a napnete ji

Baňky BellaBambi velmi dobře využijete i na automasáž dostupných partií. Dopřejte svému tělu trochu potěšení každý den. Zasloužíte si to oba.

Kde použít baňky BellaBambi Intense

Vyšší podtlak předurčuje baňky Vitality k použití na místech, která jsou více namáhaná a nejsou tolik citlivá. Mezi ty patří například hýždě, stehna, břicho, záda a zadní část krku

Zvládnete s nimi

- rozhýbat zatvrdlé svaly
- zlepšit odstraňování celulitidy
- uvolnit krk a záda zatuhlá tréninkem nebo sezením v kanceláři

Náš tip: dopřejte si s baňkami BellaBambi uvolňující partnerskou masáž a zbavte se navzájem stresu a tenze.

Masírovat s baňkami BellaBambi je snadnější než facka

Masáž s baňkami BellaBambi zvládnete levou zadní. Správný postup je následující:

1. namažte pokožku trochou masážního oleje. Zajistíte tak lepší přilnavost a skluz baňky
2. stiskněte baňku uprostřed těla a přiložte ji na místo
3. uvolněte stisk. Vzniklý podtlak baňku přisaje na pokožku
4. nyní můžete baňkou pohybovat po celém těle

Baňky BellaBambi vám zajišťují dokonalé rozprostření podtlaku pro ještě intenzivnější efekt masáže.

Jak se k masážní baňce správně chovat a na co dávat pozor

Vysoce kvalitní biokompatibilní silikon dodává baňkám BellaBambi superodolnost. K tomu, aby vám dlouho a spolehlivě sloužily, stačí

dodržovat několik základních pravidel.

Nevystavujte baňky nadměrným teplotám. Uchovávejte je v suchu a při pokojové teplotě.

Mytí baněk

Baňky vydrží i mytí v myčce na nádobí. K jejich vymytí ale postačí i mýdlová voda, která tolik nezatěžuje jejich strukturu.

V žádném případě nepoužívejte k mytí baněk ředidla ani rozpouštědla.

UPOZORNĚNÍ

Použití baněk je lepší nejdříve prokonzultovat s lékařem nebo jiným odborníkem.

Nepřekračujte doporučenou dobu 15 minut pro jednu aplikaci.

Baňky nepatří na kosti ani uzliny. Jsou určeny pouze k ošetřování svalů a měkkých tkání.

Nebaňkujte, pokud trpíte kožními problémy.

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.
Podhorská 967/17, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureko.cz

