

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Masážní baňka BellaBambi Intense 20 mm

červená

#### Základní informace

Barva: červená

Materiál: biokompatibilní silikon

Průměr: 2 cm

Typ: silikonové baňky



#### Pořádná masáž pro atlety i úředníky - masážní baňky BellaBambi

Co mají společného špičkoví atleti, cestovatelé a kancelářské síly? Svalovou tenzi a ztvrdlé svaly na zádech. Díky masážním baňkám BellaBambi Intense si s nimi hravě poradíte. Díky intenzivnímu podtlaku dosáhnete hluboko do svalů a uvolníte je.

S touto vysoce intenzivní masáží dosáhnete i u lidí s robustní pokožkou a silnou pojivovou tkání dokonalého uvolnění. Každý má právo na relaxaci. Přihlaste se o to svoje s baňkami BellaBambi.

#### Přínosy masážních baňek BellaBambi

Krom intenzivní masáže a dokonalého uvolnění zatuhlých svalů vám masáž baňkami BellaBambi přinese množství dalších benefitů.

Které to jsou?

- dokonale si uvolníte meridiány a vyladíte energetické toky
- zajistíte si dokonale účinnou detoxikaci
- alespoň na chvíli vypnete od stresu
- dokonale napnete pokožku a očistíte ji jemným peelingem
- dosáhnete úspěchů v boji proti celulitidě

S masážními baňkami Intensive je každý den o něco lepší.

**Proč baňky jsou BellaBambi považovány za nejlepší produkt na trhu**

[www.eureko.cz](http://www.eureko.cz)

#### Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.  
Petra Bezručů 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

#### Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00  
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30  
telefon: +420 800 888 909  
e-mail: [info@eureko.cz](mailto:info@eureko.cz)



Pokud existuje dokonalý produkt, jsou to právě baňky BellaBambi. Zkuste je a uvidíte sami, že předčí všechna vaše očekávání. Čím?

- bezkonkurenční odolností a pětiletou zárukou na prasknutí
- naprosto snadným ovládním, které nemá obdoby
- dokonale vypracovaným designem s ergonomickými prvky. Díky němu můžete masírovat s baňkou v každé ruce bez deformace hrdla baňky
- možností automasáže
- dosud nepřekonanou odolností a dermatologickým certifikátem pro citlivou pokožku

Přesvědčte se sami, co ještě dělá z baňek BellaBambi světovou třídu. Rozhodně má čím překvapit.

## Masáž s baňkami nikdy nebyla snadnější

Baňky BellaBambi mají jednu nespornou výhodu před konkurencí – dokonale snadné použití, které zvládne každý. Nepotřebujete při tom extrémně silný stisk ani používat obě ruce. I proto zvládnete masírovat dvěma baňkami najednou a taková masáž už má pořádné grády.

Jak na to?

1. nejdříve na pokožku mázněte trochu masážního oleje. Ten zajistí výborný skluz baňky a mnohem lepší přilnavost
2. palcem a ukazovákem stiskněte baňku zhruba uprostřed a přiložte ji na místo aplikace
3. uvolněte stisk a nechte baňku přisát na místo
4. můžete masírovat. K uvolnění stačí baňku znovu zmáčkнуть

Díky rovnoměrnému rozložení podtlaku si s baňkami BellaBambi užijete ještě intenzivnější masáž.

## Na co pamatovat při práci s masážními baňkami

Vysoce kvalitní biokompatibilní silikon dodává baňkám BellaBambi superodolnost. K tomu, aby vám dlouho a spolehlivě sloužily, stačí dodržovat několik základních pravidel.

Nevystavujte baňky nadměrným teplotám. Uchovávejte je v suchu a při pokojové teplotě.

Mytí baněk

Baňky vydrží i mytí v myčce na nádobí. K jejich vymytí ale postačí i mýdlová voda, která tolik nezatěžuje jejich strukturu.

V žádném případě nepoužívejte k mytí baněk ředidla ani rozpouštědla.

## Kdy baňky (ne)používat a jiné užitečné rady

Baňky jsou určeny na měkké tkáně a svaly. Nikdy je neaplikujte na kosti, páteř, uzliny ani třísla.

Baňkováním je dobré konzultovat s terapeutem nebo lékařem. Ten zná vaši diagnózu a může vám fundovaně poradit.

Nebaňkujte přes otevřené či nezhojené rány, ani pokud trpíte kožními problémy.

---

Baňku nechte na místě maximálně 15 minut.

[www.eureka.cz](http://www.eureka.cz)

**Kontaktní adresa a provozovna**

EUREKO, s.r.o.  
Petra Bezručů 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

**Provozní doba:**

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00  
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30  
telefon: +420 800 888 909  
e-mail: [info@eureka.cz](mailto:info@eureka.cz)

