

NÁVOD K POUŽITÍ

Polštářek teplo/chlad, soft, 3dílný, 20 x 40 cm

Základní informace

Délka: 40 cm

Šířka: 20 cm

Typ: chladící/nahřívací polštářky



Charakteristika polštářku teplo/chlad

Skvělou pomůckou pro každou domácnost je polštářek teplo/chlad, který udrží až půl hodiny stálou teplotu díky směsi jílu a gelu. Jeho univerzálnost je díky možnosti ohřevu v mikrovlnné troubě i ve vodní lázni, nebo při potřebě chlazení se může jednoduše dát do mrazničky. I po zchlazení do -18°C je stále dobře tvarovatelný. Jeho dalším bonusem je přírodní náplň šetrná k přírodě a také vysoká životnost, i když je opakovaně používán.

Na výběr jsou čtyři velikosti polštářků.

Produkt je možné použít

- při kojenecké kolice
- během bolestí kloubů, páteře či břicha
- při záchvatech žlučníku
- při bolestech ledvin
- při potížích během menstruace

Upozornění

Než budete přikládat polštářek na pokožku, je nutné dát na tělo ochrannou vrstvu ručníku. Výrobek nesmí přijít přímo na pokožku.

Před použitím tepelné terapie konzultujte svůj stav s lékařem.

www.eureka.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručě 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureka.cz



Postup při ohřívání polštářku

Vodní lázeň

Polštářek teplo/chlad vložíme do nádoby s vodou, zahřejeme na cca 95°C. Po dosažení této teploty vypneme a alespoň 2 minuty dohřejeme. Polštářek vyjmeme a otfeme. Pozor, voda se nesmí vařit!

Mikrovlnná trouba

Výrobek vložte do mikrovlnky tak, aby byl celý na otočném skleněném talíři (v případě nutnosti ho přehněte) a ohlídejte, aby se nedotýkal stěn. Pokud je výkon 750 wattů, ohřívajte max 60 vteřin. Jestli dojde ke zvětšování objemu, přerušete ohřev a prověřte, zda není polštářek poškozen. Pokud došlo k poškození, výrobek již neohřívajte!

Chladová aplikace

Polštářek vyjměte z krabice. Dejte ho na minimálně 2 hodiny do mrazničky, není nutné ho průběžně kontrolovat.

Kontraindikace

Pokud máte níže zmíněné potíže, polštářek nepoužívejte:

- potíže s oběhovým systémem
- bolesti, kde je původcem zánět
- v případech horečnatých stavů

Jak skladovat polštářek

Produkt uskladněte při pokojové teplotě, v prostorách bez přímého slunečního světla.

Likvidace polštářku

Polštářek likvidujte do směsného komunálního odpadu.

Bezpečnost

Pokud dojde ke kontaktu polštářku s horkým, špičatým či ostrým předmětem, nebo pokud je produkt přehřátý, dojde k jeho poškození, na které nelze záruku uplatnit.