

NÁVOD K POUŽITÍ

Polštářek Torex teplo/chlad, střední

Popis

Vhodné pro vymknutá nebo naražená kolena, lokty.



Použití

- bez latexu
- netoxický
- k opakovanému použití
- komfortní aplikace
- vhodný pro chladovou i tepelnou aplikaci

1. Navlékněte izolační elastický rukáv nebo ekvivalentní oděv na končetiny a vložte končetinu do polštářku Torex.
2. Pomalu rolujte polštářek na postižené místo.
3. Usazení polštářku na postižené místo.

Nikdy nedávejte zmražený nebo teplý polštářek na nechráněné místo na kůži.

Postup

Ohřev v mikrovlnné troubě: přehněte část výrobku dolů a položte ho na otočný skleněný talíř tak, aby se výrobek nedotýkal stěn. Při výkonu 700 wattů ohřívejte maximálně 60 vteřin, poté vyzkoušejte teplotu polštářku. Pakliže se vám zdá chladný, opětovně ho zahřívejte. V případě, že začne výrobek zvětšovat svůj objem, ohřívání přerušete a zkontrolujete, jestli nedošlo k poškození obalu. V takovém případě se výrobek nesmí dále zahřívat!

Ohřev ve vodní lázni: výrobek vložte do nádoby s vodou. Zahřívejte na cca 77 C. Po dosažení dané teploty vypněte ohřev a polštářek nechte dalších 2 minut ve vodní lázni ještě dohřát. Poté výrobek vyjměte a osušte. Voda se nesmí vařit!

Chladová aplikace: Výrobek vyjměte z kartonu a vložte do mrazničky minimálně na dobu 2 hodiny. Při chlazení není třeba výrobek kontrolovat.

Kontraindikace

Nepoužívejte při bolestech zánětlivého původu, při poruchách oběhového systému, při horečnatých stavech.

Uskladnění

Polštářek skladujte v prostorách bez přímého slunečního světla, při doporučené pokojové teplotě.

Likvidace

Výrobek se likviduje do směsného komunálního odpadu.

Objednací číslo

Md100069

Bezpečnost

Při styku s ostrými, špičatými či horkými předměty nebo při přehřátí výrobku dochází k jeho poškození, na které se nevztahuje záruka.

Použití polštářku konzultujte s doktorem.