

NÁVOD K POUŽITÍ

Jednorázový rašelinový zábal (velikosti 15 × 40 cm, 30 × 40 cm, 60 × 40 cm)

Klasifikace zdravotnického prostředku: Riziková třída I, nesterilní, bez měřicí funkce (pravidlo 1)

Základní informace

Typ: jednorázové rašelinové zábaly

Velikosti: 15 x 40 cm, 30 x 40 cm, 60 x 40 cm

Balení: 10 ks, 20 ks, 40 ks, 80 ks, 10 ks Premium, 40 ks Premium



Určený účel použití

K lokální tepelná aplikace, jako podpůrný prostředek při léčbě subakutních a chronických stavů revmatického a traumatického původu, artrózy, svalových kontraktur, obezity, celulitidy, bolesti kloubů a páteře, pro zvýšení lokálního prokrvení.

Charakteristika produktu

Jednorázový rašelinový zábal Klasik je tradiční zábal vyráběný z nejlepších surovin. Dlouholeté zkušenosti s rašelinovou terapií nás zavazují dodávat jednorázové rašelinové zábaly nejvyšší kvality. Top produkt, na trhu od roku 2000!

V balneoterapii mají rašelinové zábaly svoje místo odjakživa. Jejich prospěšnost je prověřena po generace. Základním atributem zábalu je tepelná setrvačnost rašeliny a její obsah huminových kyselin zabezpečujících kyselé pH. Působení rašeliny spočívá v termofyzikálních a biochemických účincích.

Kdy používat jednorázový rašelinový zábal? Jednorázový rašelinový zábal aplikujeme při:

- bolestech kloubů, zad a páteře
- artróze
- svalových kontrakturách
- subakutních a chronických stavech revmatického a traumatického původu

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureko.cz



Jak používat rašelinový zábal

- Předehřejte rašelinový nosič tepla RNT I. ve vodní lázni 50–63 °C.
- Při pokojové teplotě přiložte rašelinový zábal nepropustnou stranou na nosič tepla.
- Propustnou stranou přiložte jednorázový rašelinový zábal i s nosičem tepla na pacienta.
- Zábal nechte působit na těle pacienta po dobu 20 minut (nedoporučí-li lékař jinak).
- Po dokončení procedury odeberte zábal i s nosičem tepla z těla pacienta a jeho tělo otřete mokrou utěrkou.

Účinky rašelinového zábalu

- zvyšuje lokální prokrvení těla
- zlepšuje pohyblivost
- změkčuje vazivo
- povzbuzuje imunitní reakce
- uvolňuje svalové napětí

Kontraindikace

- akutní záněty močových cest
- těhotenství (s aplikací podél páteře)
- dekompenzovaná kardiologická onemocnění a těžké oběhové poruchy
- horečnaté stavy
- těžší zánětlivá a jiná akutní onemocnění kůže
- přecitlivělost na teplo
- otevřená poranění kůže, krvácení
- otoky a alergie na huminové kyseliny
- nepoužívejte při přecitlivělosti organismu na látky obsažené v produktu

Skladování

Jednorázový rašelinový zábal v uzavřeném/zataveném PE sáčku skladovat při teplotě +5 až +22°C, v prostorách bez přímého slunečního světla.

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureko.cz



Likvidace

Jednorázový rašelinový zábal je zcela hygienický a ekologický. Fólie ani rouno nezatěžují životní prostředí, jsou recyklovatelné a neznečišťují podzemní vody. Po použití (nebo nespotebovaný, proexpirovaný) se likviduje do směsného komunálního odpadu (kat. 200301), případně jako tříděný odpad (plasty kat. 150102), použitou rašelinu lze po vysypání z obalu použít na kompost nebo jako zeminu na květiny.

Exspirace

Vyznačena na kartonu společně se šarží rašeliny.

Objednací čísla

- ER101005 Jednorázový rašelinový zábal 30 x 40 cm, 40 ks
- ER101011 Jednorázový rašelinový zábal 30 x 40 cm, 10 ks
- ER101006 Jednorázový rašelinový zábal 15 x 40 cm, 80 ks
- ER101022 Jednorázový rašelinový zábal 15 x 40 cm, 20 ks
- ER101102 Jednorázový rašelinový zábal 60 x 40 cm, 20 ks
- ER101101 Jednorázový rašelinový zábal 60 x 40 cm, 10 ks
- ER101105 Jednorázový rašelinový zábal 30 x 40 cm, Premium, 40 ks
- ER101144 Jednorázový rašelinový zábal 30 x 40 cm, Premium, 10 ks

Výrobce

Eureko, s.r.o.

Petra Bezruč 1877/67, 468 04 Jablonec n. N.

IČO: 254 163 75, DIČ: CZ25416375

Datum vydání návodu: 20. 1. 2021

