

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Ortéza na kotník MUELLER Adjust-to-fit Ankle

### Support

### Základní informace

Část těla: kotník

Výrobce: Mueller Sports Medicine



### Ortéza na kotník s dokonalým zpevněním přímo na míru vaší noze

Zabraňte zranění s univerzální ortézou, která se **přizpůsobí každé noze**. Stačí zatáhnout za dva patentované popruhy a máte svůj kotník dokonale pod kontrolou. Nastavte utažení, které vám bude vyhovovat a vyrazte za sportem nebo na výlety. Ortéza Mueller bez problémů vydrží i celodenní nošení.

### Její výhody?

- je lehká a prodyšná
- snadno ji nasadíte i sundáte
- má antimikrobiální úpravu, takže nezapáchá
- neobsahuje latex ani neopren
- je vhodná na obě nohy
- jedna velikost padne všem (velikost 37 - 48 muži, 39 - 49 ženy)

### Na co se ortéza Adjust-to-fit hodí

Tato ortéza je ideální pro slabé, ztuhlé a zraněné kotníky. Podá vám pomocnou ruku při celodenním nošení i při sportovních aktivitách.

### Jak funguje ortéza na kotník Adjust-to-fit

[www.eureka.cz](http://www.eureka.cz)

#### Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.  
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

#### Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00  
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30  
telefon: +420 800 888 909  
e-mail: [info@eureka.cz](mailto:info@eureka.cz)



Ortéra na kotník Adjust-to-fit je navržena s cílem zabránit dalšímu zranění. Zároveň tak urychluje vaše zotavení po úrazu. Jak to dělá? Omezením rozsahu pohybu vašeho kotníku. Toho dosáhnete pomocí dvou nastavitelných vnitřních popruhů, které poskytují komfortní zpevnění.

Ortéra je vyrobena ze speciálního mřížkového materiálu, který odvádí vlhkost a nadměrné teplo. Díky tomu zachová komfort po celou dobu nošení.

## Jak prát vaši ortézu

Ortézu perle ručně ve studené nebo vlažné vodě. Můžete přidat jemný prací prostředek. V žádném případě nepoužívejte aviváže ani bělidla. Po vyprání pořádně opláchněte a nechte volně vyschnout. Nesušte na topení a nežehlete.

## Objednací číslo

MS3060U