

NÁVOD K POUŽITÍ

Sprchová stolička, kulatá

Základní informace

Typ: sprchové stoličky

Průměr kulatého sedáku: 32 cm

Materiál: plast, hliník

Nosnost: 120 kg



Popis produktu

Výborným pomocníkem zejména pro seniory, či pro osoby se sníženou pohyblivostí je tato stolička s kulatým sedákem a protiskluzovou úpravou nožiček. Pro její stabilitu je možné ji využít ve sprše, ale díky lehkosti ji můžete přenášet a používat i kdekoli v jinde, například při oblékání či obouvání. Výška je nastavitelná do 8 poloh, od 35 cm do 53 cm.

Indikace

Omezená schopnost stát, omezená stabilita, obecná slabost.

Kontraindikace

Zhoršená rovnováha vsedě, nedostatečná sebekontrola, stavy zmatenosti.

Před prvním použitím

Vyjměte obsah z kartonu. Zkontrolujte všechny části, zda nejsou poškozeny.

Pokud dojde k poškození při přepravě, výrobek NEPOUŽÍVEJTE.

Nastavení výšky stoličky

- Výšku sedátka nastavíte na všech teleskopických nohách.
- Nejprve je třeba vytáhnout zajišťovací sponu.
- Poté můžete nastavit teleskopickou nohu na požadovanou délku.

- Opět zajistěte sponou.
- Čepy musí být viditelně vnořeny z dírek.

Použití

Před použitím zkontrolujte bezpečné zajištění výšky nohou. Pokud se sprchová stolička vrklá, něco není v pořádku. Postavte ji tak, aby stála stabilně. Useďte a vstávejte s pomocí pečovatele, nebo blízké osoby. Sedte vždy uprostřed stoličky, jinak hrozí nebezpečí naklonění a pádu.

Čištění a dezinfekce

K čištění sprchové stoličky nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní předměty.

Všechny kovové části je nejlepší čistit vlhkým hadříkem spolu s běžně dostupnými jemnými čistícími prostředky pro domácnost.

Plastové povrchy čistěte přípravky určenými na plasty.

Dezinfikujte běžně dostupnými prostředky bez chlóru.

Bezpečnostní upozornění

- Tělesná hmotnost uživatele nesmí překročit 120 kg!
- Sprchovou stoličku mohou používat pouze lidé, kteří sami udrží rovnováhu v sedě.
- Pokud jsou části sprchové stoličky ohnuté nebo zdeformované, již stoličku nepoužívejte.
- Všechny 4 nohy musí být nastaveny na stejnou výšku.
- Před každým použitím je třeba zkontrolovat stabilitu stoličky.
- Při nastavování výšky se ujistěte, že jsou zajišťovací spony správně zacvaknuté.
- Při použití mýdel a šampónu buďte opatrní, zvyšuje riziko uklouznutí.
- Sprchová stolička není vhodná pro dlouhodobé sezení!
- Nepoužívejte sprchovou stoličku v sauně!
- Pravidelně kontrolujte gumové koncovky na nohách.

Záruka

Ze záruky jsou vyloučena poškození vzniklá v důsledku nesprávného používání, běžného opotřebení a vad, které neovlivňují hodnotu nebo použitelnost produktu. Ze záruky jsou také vyloučeny vady, které vznikly v důsledku technických změn či úprav a nesprávného používání.

www.eureka.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručě 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureka.cz



Důležité: bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.

Objednací číslo

ND40030

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručů 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureko.cz

