

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Sedátko na vanu s madlem Plus

#### Základní informace

Typ: sedátka

Barva: bílé s modrým madlem

Nosnost: 150 kg

Materiál: plast



#### Popis produktu

Sedátko slouží jako pomocník pro seniory a osoby se sníženou pohyblivostí a zajišťuje bezpečí a pohodlí při osobní hygieně.

K přidržování slouží praktické madlo. Pomocí nastavitelných nožek upevníme sedátko na vanu, která má vnitřní šířku od 38 do 61 cm.

#### Indikace

Omezená schopnost stát, omezená stabilita, obecná slabost.

#### Kontraindikace

Zhoršená rovnováha vsedě, nedostatečná sebekontrola, stavy zmatenosti.

#### Před prvním použitím

Vyjměte obsah z kartonu. Před montáží zkontrolujte všechny součásti, zda nejsou poškozeny přepravou.

Pokud dojde k poškození při přepravě - NEPOUŽÍVEJTE.

#### Montáž

- Rukojeť na sedátko upevníte pomocí dvou plastových šroubů (lze použít minci).
- Rukojeť musí být umístěna naproti vstupní straně vany.
- Nožičky sestavíte zasunutím plastových šroubů do dlouhých otvorů shora. Ze spodní desky dáte nejprve podložky, potom

[www.eureka.cz](http://www.eureka.cz)

#### Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.  
Petra Bezručů 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

#### Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.  
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.  
Telefon: +420 800 888 909  
E-mail: [info@eureka.cz](mailto:info@eureka.cz)



utáhnete upínací čepy (nožičky) ve směru hodinových ručiček.

- Seřídíte nožičky tak, aby byly vždy v kontaktu s vnitřním povrchem vany, aby bylo uchycení těsné.
- Sedátko se nesmí posouvat tam a zpět.
- Oba konce sedátka musí ležet úplně na okrajích vany. Zajistíte tak pevné a bezpečné uchycení sedátka.

## Použití

Před každým použitím zkontrolujte pevné usazení sedátka. Pokud je možné desku posouvat, znovu dotáhněte 4 upínací šrouby (nožičky). Opatrně se posadte doprostřed desky, jednou rukou se držte rukojeti (nebo pečovatelle/pečovatelky), zvedněte nohy a otočte se do vany. Posadte se prosím vzpřímeně doprostřed sedátka, jinak hrozí nebezpečí převrácení a uklouznutí!

## Čištění a dezinfekce

Čištění provádějte vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem nebo mýdlovou vodou. Po každém použití je možné sedátko dezinfikovat běžnými dezinfekčními prostředky bez chlóru.

## Bezpečnostní upozornění

- Sedátko smějí používat pouze osoby, které mohou samostatně ovládat svou rovnováhu!
- Pečovatel či ošetřovatel musí poskytnout pomoc při sedání, vstávání a při otáčení.
- Maximální nosnost je 150 kg.
- Pravidelně kontrolujte, zda je sedátko nepoškozené a pevně zajištěné. Pokud tomu tak není, již jej nepoužívejte.
- Před každým použitím kontrolujte pevné usazení sedátka.
- Při používání šamponu a sprchových přípravků buďte opatrní, je zde nebezpečí uklouznutí.
- Nepoužívejte mastné výrobky, povrchy jsou pak velice kluzké.
- Sedátko není vhodné pro dlouhé sezení!
- Upínací šroub pravidelně kontrolujte a v případě potřeby je vyměňte.
- Opravy smí provádět pouze vyškolený personál s použitím originálních náhradních dílů.

## Záruka

Ze záruky jsou vyloučena poškození vzniklá v důsledku nesprávného používání, běžného opotřebení a vad, které neovlivňují hodnotu nebo použitelnost produktu. Ze záruky jsou také vyloučeny vady, které vznikly v důsledku technických změn či úprav a nesprávné údržby.

**Důležité: bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.**

## Objednací číslo

[www.eureka.cz](http://www.eureka.cz)

### Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.  
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

### Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.  
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.  
Telefon: +420 800 888 909  
E-mail: [info@eureka.cz](mailto:info@eureka.cz)



ND40041

[www.eureko.cz](http://www.eureko.cz)

**Kontaktní adresa a provozovna:**

EUREKO, s.r.o.  
Petra Bezručů 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

**Provozní doba:**

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.  
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.  
Telefon: +420 800 888 909  
E-mail: [info@eureko.cz](mailto:info@eureko.cz)

