

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Nástavec na WC Relaxon Basic, s víkem

#### Základní informace

Materiál: plast  
Vyvýšení: 10 cm  
Nosnost: 200 kg



Nástavec na WC Relaxon Basic s víkem je vhodný především pro starší osoby, osoby po úrazech či operacích nebo pro osoby s omezenou pohyblivostí. Nástavec usnadňuje usedání na toaletu a vstávání z ní, navíc při jeho použití nedochází k nadměrnému zatěžování kloubů.

Nástavec typu Relaxon Basic má anatomický tvar s výřezy vpředu i vzadu pro usnadnění hygieny. Jednoduchým upevněním zvýšíte toaletní mísu o 10 cm.

WC nástavec s víkem je vhodný pro všechny standardní toalety.

#### Jak nástavec upevnit

Jednoduše nástavec položte na záchovodu mísu a přitlačte jej na místo. Stejně snadno lze nástavec i odstranit, což dává ostatním uživatelům možnost kdykoliv použít toaletu i bez nástavce.

#### Údržba

Nástavec doporučujeme omývat jemným, běžně dostupným čisticím prostředkem.

Nepoužívejte žádné žíravé nebo abrazivní čisticí prostředky, mohou poškodit povrch nástavce a způsobit změnu barvy.

#### Objednací číslo

ND40056