

NÁVOD K POUŽITÍ

Navlékač ponožek, bílý

Základní informace

Barva: bílá

Délka: 90 cm

Materiál: plast

Typ: navlékač ponožek



Popis produktu

Pro jedince s omezenou hybností je oblékání namáhavou a často i bolestivou denní nutností. Proto byly vyvinuty pomůcky, které vám pomohou tento proces usnadnit a urychlit. Nejsložitější bývá ohýbání a pohyb nohama, v tomto případě je osvědčeným pomocníkem zejména navlékač ponožek. Ponožku jednoduše nasadíte na plastovou část a za pomoci plastových držadel ji natáhnete na nohu.

Indikace

Porucha funkce prstů, rukou a paží; porucha úchopu, např. následky zranění, paralýza, amputace, ztuhlost kloubů, obezita.

Kontraindikace

Poranění obratlů.

Návod k použití

- Ponožku natáhněte přes navlékač až do oblasti prstů.
- Položte si navlékač s ponožkou na zem a posaďte se. Pomocné šňůrky držte v ruce.
- Vložte nohu do navlékače, prsty zasaňte až do prstové části ponožky.
- Pomalu narovnávejte nohu v kolenu a současně s mírným taháním za pomocné šňůrky vytáhněte ponožku nahoru, dokud ji nebudete moci uchopit.

Čištění a praní

www.eureka.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručě 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureka.cz



Navlékač ponožek lze prát v ruce a čistit běžně dostupnými jemnými čisticími prostředky. Poté dobře propláchnout vodou a nechat vyschnout. Pomůcku lze také dezinfikovat běžnými dezinfekčními prostředky bez obsahu chloru.

Bezpečnostní upozornění

- Navlékač ponožek by se měl používat pouze vsedě, jinak hrozí nebezpečí pádu!
- Abyste zabránili poškození punčochy, ujistěte se, že nehty na prstech nemáte prasklé nebo natržené.
- Výrobek by neměl přijít do styku s porušenou nebo poraněnou kůží.
- Pozor, navlékač není vhodný pro střídavé použití mezi pacienty!
- Dodržujte dobré hygienické návyky.

Záruka

Ze záruky jsou vyloučena poškození vzniklá v důsledku nesprávného používání, běžného opotřebení a vad, které neovlivňují hodnotu nebo použitelnost produktu. Ze záruky jsou také vyloučeny vady, které vznikly v důsledku technických změn či úprav a nesprávné údržby.

Důležité: bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.

Objednací číslo

ND40062

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručů 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureko.cz

