

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Navlékač ponožek s rukojetí

#### Základní informace

Barva: bílá

Délka: 68 cm

Materiál: plast

Typ: navlékač ponožek



#### Popis produktu

Často se oblékání může stát namáhavou a bolestivou nutnou činností, zejména u lidí se sníženou pohyblivostí. Tento problém vám pomohou vyřešit speciální pomůcky, zejména ty, které se zaměřují na oblast nohou. Osvědčeným pomocníkem je navlékač ponožek, kdy ponožku jednoduše nasadíte na konec navlékače a pomocí rukojeti natáhnete na nohu. Oblékání se nejen stane rychlejším, ale hlavně vás nebude trápit bolest při ohýbání.

#### Návod k použití

- Natáhněte ponožku na navlékač až k oblasti prstů.
- Natáhněte konec ponožky přes zářez navlékače.
- Položte připravený navlékač na podlahu před sebe a posaďte se. Uchopte rukojeť.
- Vložte nohu do navlékače. Prsty zasuňte až na konec do oblasti špičky.
- Pomalu narovnávejte nohu v koleni a natahujte ponožku až do chvíle, než ji budete moci uchopit za okraje.
- Opakujte postup pro druhou nohu.
- Ujistěte se, že kompresní punčocha/ponožka nevytváří záhyby a je hladce natažena.

#### Čištění a péče

[www.eureka.cz](http://www.eureka.cz)

#### Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.  
Petra Bezručů 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

#### Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00  
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30  
telefon: +420 800 888 909  
e-mail: [info@eureka.cz](mailto:info@eureka.cz)



K čištění nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní předměty. Navlékač lze čistit vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem pro domácnost.

Dezinfikujte běžně dostupnými dezinfekčními prostředky bez obsahu chlóru. Při použití dezinfekčních prostředků je třeba dodržovat pokyny výrobce.

## Bezpečnostní upozornění

- Navlékač ponožek by se měl používat pouze vsedě, jinak hrozí nebezpečí pádu!
- Abyste zabránili poškození punčochy či ponožky, ujistěte se, že nehty na prstech nemáte prasklé nebo natržené.
- Výrobek by neměl přijít do styku s porušenou nebo poraněnou kůží.
- Pozor, navlékač není vhodný pro střídavé použití mezi pacienty!
- Dodržujte dobré hygienické návyky.

## Záruka

Ze záruky jsou vyloučena poškození vzniklá v důsledku nesprávného používání, běžného opotřebení a vad, které neovlivňují hodnotu nebo použitelnost produktu. Ze záruky jsou také vyloučeny vady, které vznikly v důsledku technických změn či úprav a nesprávné údržby.

Důležité: bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.

## Objednací číslo

ND40063