

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Navlékač punčoch Lang, nastavitelný, vnitřní

šířka 12 cm

#### Základní informace

Typ: navlékač punčoch

Rozměry: 21 x 18 cm

Vnitřní šířka: 12 cm

Výška: 41-61 cm



#### Popis produktu

Navlékač zdravotních kompresních punčoch je speciálně vyvinutou pomůckou usnadňující oblékání. Do střední části jednoduché konstrukce navléknete punčochu a pomocí výsuvných držadel natáhnete punčochu na nohy. Délku držadla si nastavíte od 41 cm do 61 cm. Je možné ho použít také pro jiné typy punčoch. Navlékač vám pomůže nejen urychlit oblékání, ale též vás osvobodí od bolestivých a obtížných pohybů.

#### Návod k použití

- Nejprve postavte navlékač před sebe (např. na stůl) tak, aby širší strana rámu směřovala k vám a otvor v půlkruhovém rámu dopředu. (Tak, jak je na obrázku produktu).
- Připravte si punčochu. Špička punčochy směřuje dolů, pata k Vám. Ohrňte horní část punčochy přes rám.
- Opatrně shrňte punčochu přes rám dolů, dokud nebude celá punčochu navlečená až po špičku.
- Položte navlékač na podlahu. Chodidlo vsuňte do špičky punčochy.
- Raději se o něco opírejte (např. o stůl), abyste lépe udrželi rovnováhu.
- Posadte se a nakloňte navlékač tak, abyste mohli pohodlně vsunout chodidlo do punčochy.
- Držte pevně rukojeti navlékače a zároveň tlačte chodidlo dolů směrem k podlaze.
- Tahem za obě rukojeti si nasuňte punčochu nahoru až ke koleni.
- Jakmile je punčochu těsně pod kolenem, vykloňte navlékač nepatrně směrem dozadu a odložte jej stranou.
- Vyhlaďte vzniklá nahnutí vytažením punčochy směrem nahoru.

[www.eureka.cz](http://www.eureka.cz)

#### Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.  
Petra Bezručů 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

#### Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00  
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30  
telefon: +420 800 888 909  
e-mail: [info@eureka.cz](mailto:info@eureka.cz)



- Dbejte na to, abyste postupně vypínali punčochu kousek po kousku bez toho, aniž byste ji tahali za její lem.
- V případě, že Vám punčocha podkluzuje, použijte pro konečnou úpravu gumové rukavice.

## Čištění a dezinfekce

Pomůcku lze čistit vlhkým hadříkem, případně jemným čisticím prostředkem pro domácnost, opláchnout a osušit. K dezinfekci používejte běžně dostupné dezinfekční prostředky bez obsahu chlóru. Při použití dezinfekčních prostředků je třeba dodržovat pokyny výrobce.

## Bezpečnostní upozornění

- Navlékač používejte pouze vsedě, jinak hrozí nebezpečí pádu!
- Pomůcka není vhodná pro střídavé použití mezi pacienty!
- Dodržujte hygienická pravidla.
- Navlékač nepoužívejte, máte-li poraněné obratle (Vždy je lepší poradit se se svým lékařem)
- Používejte pouze k určeným účelům.

## Záruka

Ze záruky jsou vyloučena poškození vzniklá v důsledku nesprávného používání, běžného opotřebení a vad, které neovlivňují hodnotu nebo použitelnost produktu. Ze záruky jsou také vyloučeny vady, které vznikly v důsledku technických změn či úprav a nesprávné údržby.

Důležité: bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.

## Objednací číslo

ND40067