

NÁVOD K POUŽITÍ

Podavač předmětů s gumovými koncovkami, 50 cm

Základní informace

Délka: 50 cm

Materiál: plast

Materiál: hliník

Typ: podavač předmětů

- Praktická pomůcka pro seniory či osoby s potížemi při ohýbání
- Jednoduchá mechanika svírání
- Gumové koncovky



Popis produktu

Podavač najde své využití doma i venku. Zvedací kleště jsou tvořeny dvěma koncovkami z gumy, jejichž sevřením můžeme zvedat i extrémně malé předměty - klíče, mince, telefon apod. Podavač je možné využít i na zahradě pro utrhnutí ovoce nebo sebrání suchého listí či sbírání odpadků. Madlo je ergonomicky tvarované a pro stisk mechanismu není potřeba velké síly.

Použití

Podavač je pomůcka, která usnadňuje podávání a manipulaci s drobnými předměty. Omezuje bolestivé ohýbání.

Indikace

Omezený dosah, špatná funkce rukou, prstů a paží, bolesti dolních končetin, poranění, omezená mobilita.

Návod k použití

- Procvičte správnou manipulaci s podavačem.
- Jednou rukou uchopte rukojeť.

www.eureka.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručě 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureka.cz



- Přitažením a povolením uchopovacího mechanismu otvírejte nebo zavírejte kleštiny.

Čištění a dezinfekce

Podavač lze čistit vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující oleje. Pro dezinfekci zvolte běžně dostupný dezinfekční prostředek bez obsahu chlóru. Při použití dezinfekčních prostředků se řiďte pokyny výrobce.

Bezpečnostní upozornění

- Určeno pro dospělé.
- Seznamte se s funkcemi podavače a procvičujte si správné zacházení.
- Předměty nesmí vážit více než 1 kg.
- Vždy se ujistěte, že podavač drží předmět pevně.
- Nepodávejte teplé nebo žhnoucí předměty jako jsou svíčky nebo cigarety.
- Křehké předměty berte opatrně.
- Buďte ohleduplní a opatrní k okolí a k lidem kolem vás, aby nedošlo ke zranění.

Záruka

Ze záruky jsou vyloučena poškození vzniklá v důsledku nesprávného používání, běžného opotřebení a vad, které neovlivňují hodnotu nebo použitelnost produktu. Ze záruky jsou také vyloučeny vady, které vznikly v důsledku technických změn či úprav a nesprávné údržby.

Důležité: bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.

Objednací číslo

ND40096