

NÁVOD K POUŽITÍ

Umyvadlo na mytí vlasů, bílé

Základní informace

Typ: mytí vlasů

Materiál: vinyl

Velikost: 64 x 52 cm

Výška: 17 cm

Barva: bílá



Popis produktu

- Nafukovací přenosné umyvadlo
- Pro pohodlné umývání vlasů na lůžku
- Podpora hlavy
- Výřez na krk
- Nafukování pomocí ventilu (ústy)
- Bezpečnostní zamykatelný odtok vody

Umyvadlo slouží pro umývání vlasů osobám odkázaným na lůžko nebo pro osoby se špatnou pohyblivostí. Lze ho využít i na cestách nebo pro děti. Je vyrobeno z vinylu, který je odolný a lehký. Výška umyvadla je navržena tak, aby umývání bylo co nejpohodlnější a bezpečné. K nafouknutí slouží jednoduchý ventil.

Indikace

Pacienti upoutaní na lůžko, slabost.

Kontraindikace

Onemocnění uší, srdeční nedostatečnost, poranění páteře (v případě pochybností se obraťte na svého lékaře).

Před prvním použitím

www.eureka.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureka.cz



Zkontrolujte všechny součásti balení. Zkontrolujte, zda není produkt poškozený. V případě poškození kontaktujte dodavatele. Pozorně čtěte návod k použití.

Návod k použití

- Nafoukněte umyvadlo ústy.
- Připravte si veškeré pomůcky pro mytí (ručníky, žínky, šampon, prázdný kbelík atd.)
- Sklopte hlavovou část postele do vodorovné polohy, položte umyvadlo na postel.
- Do výřezu na krk pacienta vložte ručník.
- Uložte pacienta na umyvadlo.
- Pacient by při umývání neměl mít žádné náušnice ani brýle.
- Pokud je to třeba, chraňte oči pacienta žínkou, uši špunty do uší apod.
- Umyjte vlasy pacienta vodou, šamponem a opláchněte vodou.
- Vypusťte vodu z umyvadla hadičkou do kbelíku.
- Pacientovi osušte vlasy suchým ručníkem.
- Usušte umyvadlo a v případě potřeby vyfoukněte a složte.

Údržba a čištění

Umyvadlo nevyžaduje žádnou náročnou údržbu, ale je potřeba dbát na jeho vysušení po použití. Lze jej také dezinfikovat běžně dostupnými dezinfekčními prostředky určenými na plast. Při použití dezinfekce se řiďte doporučením výrobce!

Bezpečnostní upozornění

- Používejte pouze teplou vodu do 38 ° C, aby nedošlo k popálení!
- Nenechávejte pacienta samotného s naplněným umyvadlem.
- Pravidelně kontrolujte těsnost umyvadla.
- Umyvadlo nepřenášejte dokud není zcela vyprázdněno!
- Umyvadlo na vlasy není hračka a nesmí se používat k jiným účelům, než je určeno.

Záruka

Ze záruky jsou vyloučena poškození vzniklá v důsledku nesprávného používání, běžného opotřebení a vad, které neovlivňují hodnotu nebo použitelnost produktu. Ze záruky jsou také vyloučeny vady, které vznikly v důsledku technických změn či úprav a nesprávné údržby.

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručě 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureko.cz



Důležité: bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.

Objednací číslo

ND40153

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručů 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureko.cz

