

NÁVOD K POUŽITÍ

Masážní koule Trendy Bola velikost L modrá

Barva: modrá
Materiál: EPP
Průměr: 10 cm
Typ: masážní koule



Masážní koule Trendy Bola – zatočte se ztuhými svaly a bolavými trigger pointy

Snadno a rychle se vypořádáte se spoušťovými body a ztuhými fasciemi a svaly pomocí speciální masážní koule Trendy Bola, která je vyvinuta právě pro tento účel bez ohledu na to, jak hluboko se tenze nachází. S touto účinnou autoterapeutickou pomůckou zapůsobíte hluboko do svalů a uvolníte i ty nejzavilejší tenze. Cvičit můžete opření o stěnu či na podlaze, nebo s Bolou položenou na stole. Pravidelným používáním získáte pružné a maximálně výkonné svaly.

Výhody masážní koule Trendy Bola

- účinné cílené automasáže
- nastavení intenzity tlaku
- vhodné pro malé a těžko dosažitelné trigger pointy
- univerzální využití – hlava, krk, spánky, nohy, paže...
- po ruce i na cestách
- posiluje a uvolňuje fascie

Jak správně používat Trendy Bola?

Stanovte si požadovaný efekt, vyberte si velikost a barvu koule Trendy Bola dle svého uvážení a zaměřte se na automasáž v průběhu svalů. Pro uvolnění hypertonických svalů mířte kolmo přes svalová vlákna. Pomocí Trendy Bola můžete také efektivně promasírovat

trigger pointy.

Péče o pomůcky Trendy Bola

Aby vám tato jedinečná terapeutická pomůcka vydržela co nejdéle, je vhodné ji omývat vlažnou vodou s trochou mýdla. Nepoužívejte rozpouštědla, ani agresivní chemii.

Masážní koule udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

Objednací číslo

TS100334

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručů 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureko.cz

