

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Masážní baňka s balonkem

#### Základní informace

Velikost balení [Ks]: 1 ks

Typ: plastové baňky

Materiál: plast

Na výběr je 5 různých velikostí: 19 mm, 26 mm, 36 mm, 48 mm, 57 mm

Výrobce: Nasara



Baňky jsou vyrobeny z průhledného akrylového plastu s balonkem pro baňkovou masáž.

#### Aplikace

1. Očistěte a osušte pokožku.
2. Přiložte baňku na požadované místo.
3. Stiskněte balonek, abyste vytvořili požadovaný podtlak a nechte působit.
4. Chcete-li baňku odejmout, jemně ji ze strany nadzvedněte.

#### Čištění/sterilizace

Odejměte balonek a očistěte sklo vlažnou mýdlovou vodou nebo ji otřete dezinfekčním ubrouskem s nízkým obsahem alkoholu.

#### Upozornění

Nenechávejte baňky působit déle než 10 minut.

Nepoužívejte poškozené baňky.

Objednací číslo

[www.eureko.cz](http://www.eureko.cz)

#### Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.  
Petra Bezručě 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

#### Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00  
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30  
telefon: +420 800 888 909  
e-mail: [info@eureko.cz](mailto:info@eureko.cz)



NA707619 ... Masážní baňka s balonkem, 19 mm

NA707626 ... Masážní baňka s balonkem, 26 mm

NA707636 ... Masážní baňka s balonkem, 36 mm

NA707648 ... Masážní baňka s balonkem, 48 mm

NA707657 ... Masážní baňka s balonkem, 57 mm

[www.eureka.cz](http://www.eureka.cz)

**Kontaktní adresa a provozovna**

EUREKO, s.r.o.

Petra Bezručů 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75

Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

**Provozní doba:**

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00

letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30

telefon: +420 800 888 909

e-mail: [info@eureka.cz](mailto:info@eureka.cz)

